


InKina®

Encre de Chine - 2mL

MARQUEUR CHIRURGICAL STÉRILE POUR TATOUAGE ENDOSCOPIQUE

Solution stérile en
seringue pré-remplie de 2 mL

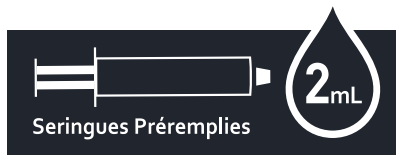

Safer & Healthier

MARQUEUR CHIRURGICAL STÉRILE POUR TATOUAGE ENDOSCOPIQUE ⁽¹⁾

InKina®

Encre de Chine - 2mL

CHIRURGIE	INDICATIONS	VOIE D'ADMINISTRATION	DILUTION	VOLUME D'INJECTION
GASTRO-DIGESTIVE	Identification des lésions pathologiques lors des endoscopies digestives. Le marqueur est utilisé pour le tatouage des lésions de la muqueuse gastrointestinale (y compris les lésions du côlon) lorsque l'endoscopie prévoit qu'il devra être procédé à l'ablation chirurgicale de la lésion dans un délai de 30 jours	Sous muqueuse	Non dilué ou diluée au 1:10 dans solution saline	0,5 - 0,75 mL de suspension par injection • Il est conseillé de faire au moins quatre injections tout autour de la lésion • Il est conseillé d'utiliser un maximum de 8 mL de suspension par patient

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI – MISES EN GARDE

- NE PAS ADMINISTRER PAR VOIE ORALE.
- Veuillez consulter la notice pour prendre connaissance de l'ensemble des recommandations lors de l'administration de InKina®.

CONTRE INDICATIONS

- NE PAS INJECTER PAR VOIE INTRAVEINEUSE.
- L'utilisation du produit est contre-indiquée chez les patients ayant une hypersensibilité connue à un de ses composants.
- ATTENTION : l'utilisation du dispositif médical est déconseillée chez les femmes enceintes ou allaitantes et chez les patients pédiatriques.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Des études cliniques ont démontré que l'utilisation de marqueurs à base d'encre de chine ne provoque aucun effet indésirable ou trouble chez les patients⁽²⁾. Toutefois le tatouage endoscopique de la zone intrapéritonéale devrait être surveillé attentivement afin de contrôler l'apparition d'éventuelles réactions indésirables.



(1) Notice InKina®, (2) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10094755/>

InKina®

POUR UN GESTE SIMPLE,
RAPIDE ET MAÎTRISÉ

RÉDUIT LE TEMPS DE PRÉPARATION

- Seringue pré-remplie prête à l'emploi stérile extérieurement
- Pas d'étape de prélèvement à partir d'une ampoule ou d'un flacon
- Pas d'étiquette d'identification à préparer, pas de désinfection pour le nettoyage des solutions à prélever

DIMINUE LES RISQUES DE PIQÛRES ET DE COUPURES POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

- Pas d'ampoule verre à casser - Moins d'aiguille lors de la préparation
- Seringue pré-remplie incassable en polypropylène
- Connexion luer lock

PRÉVIENT LES RISQUES DE CONFUSION DE PRODUITS ET LIMITE LES ERREURS DE DILUTION

- Étiquetage clair et optimisé sur la seringue, le suremballage individuel et la boîte
- Bouchon de couleur blanc comme aide visuelle à l'identification
- Échelle graduée pour guider l'administration*

LIMITE LES RISQUES DE CONTAMINATION SEPTIQUE

- Seringue pré-remplie emballée individuellement, stérile extérieurement et directement manipulable sur un champ opératoire stérile

LIMITE LES RISQUES CHEZ LE PATIENT

- Un dispositif sans latex, sans phtalates ni bisphénol
- Une formulation sans produit d'origine animale
- Pas de risque d'injection de particules de verre

RÉDUIT LES DÉCHETS

- Moins de consommables utilisés
- Déchets engendrés moins dangereux et moins onéreux à éliminer



* L'échelle graduée est indicative.

InKina®

Encre de Chine - 2mL

COLORANT CHIRURGICAL STÉRILE

Solution stérile en
seringue pré-remplie de 2 mL




CODE PRODUIT
D 0003 H

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif médical de Classe IIa – Marquage CE 0477
- Fabrication européenne
- Seringues préremplies de 2 mL insérées dans un étui de protection individuel
- Péréemption : 24 mois
- Conserver les seringues dans leur emballage d'origine afin de les protéger de la lumière
- Ne pas utiliser le produit si l'emballage est abîmé
- Conservation : température ambiante
- Ne pas congeler

NOUVEAU
PACKAGING

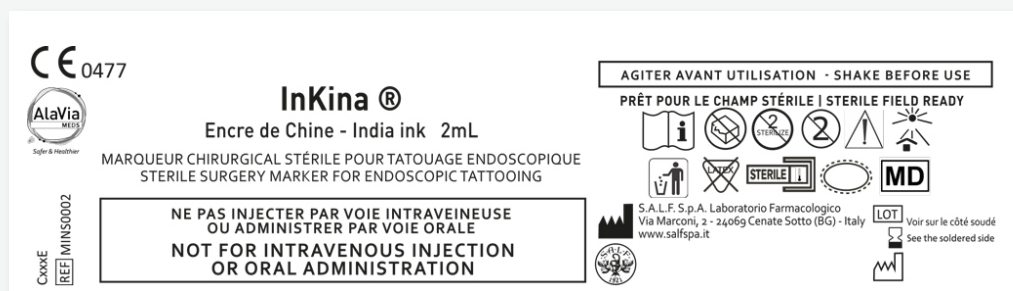


Étui de protection individuel de la seringue



Étiquetage seringue

NOTICE

- La notice InKina® est consultable dans son intégralité sur notre site Web : www.alaviameds.com/nos-produits

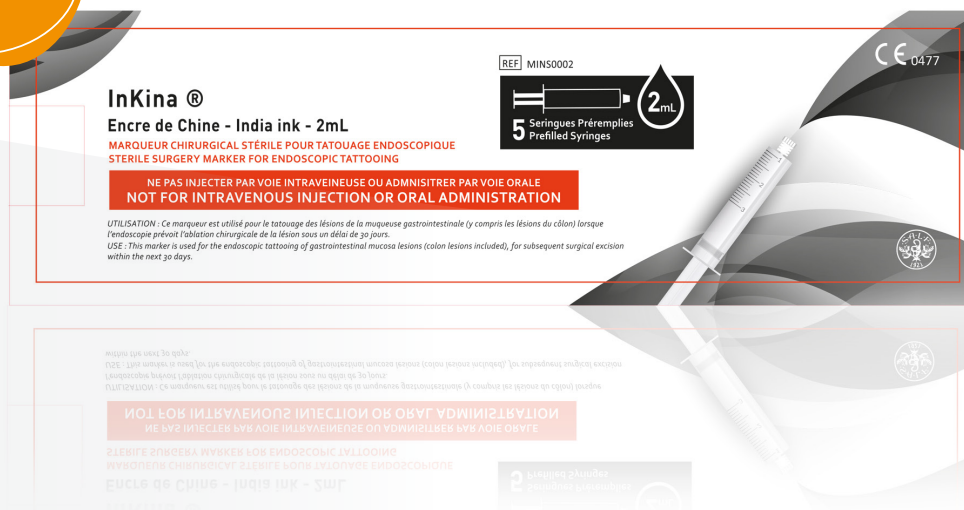

Fabriqué par le Laboratoire
S.A.L.F. SpA (Italie)



UNE GAMME UNIQUE DE MARQUEURS CHIRURGICAUX STÉRILES

Seringues pré-remplies stériles extérieurement et emballées individuellement

Pour un geste simple,
rapide et sûr

FABRIQUÉ EN EUROPE



CE 0477



MethyBlue®


Bleu de MÉTHYLÈNE 1 % - 10mg/mL

MARQUEUR CHIRURGICAL DESTINÉ À LA CHIRURGIE MAMMAIRE, UROLOGIQUE AINSI QUE GASTRO-DIGESTIVE

5 mL

Bouchon BLEU

Code produit: D 0001 H

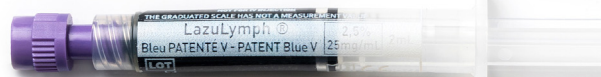

LazuLymph®

Bleu PATENTÉ V 2,5 % - 25mg/mL

MARQUEUR CHIRURGICAL DESTINÉ À LA CHIRURGIE MAMMAIRE, GASTRO-DIGESTIVE AINSI QUE DE LA PEAU

2 mL

Bouchon VIOLET

Code produit: D 0002 H



InKina®



Encre de Chine

MARQUEUR CHIRURGICAL POUR TATOUAGE ENDOSCOPIQUE

2 mL

Bouchon BLANC

Code produit: D 0003 H

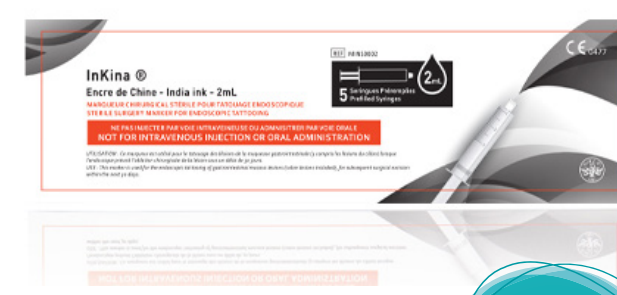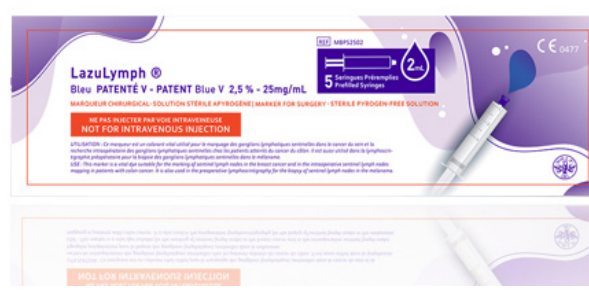

NOTICES

Les notices sont consultables dans leur intégralité sur notre site Web :

www.alaviameds.com/nos-produits

CONDITIONS DE LIVRAISON

- Commande minimum de 5 unités, commande par multiple de 5

- Franco de port pour 15 unités de MethyBlue® ou 15 unités de InKina® ou 5 unités de LazuLymph® minimum

CONTACTS

AlaVia MEDS
16 avenue Rosa Parks
69009 Lyon – France
+33 (0)4.51.23.66.05
www.alaviameds.com

SERVICE DES MARCHÉS

servicemarches@alaviameds.com

COMMANDES

commandes@alaviameds.com

MATERIOVIGILANCE

vigilance@alaviameds.com



Safer & Healthier

MethyBlue®, LazuLymph® et InKina® sont les marques déposées du fabricant S.A.L.F. S.p.A Laboratorio Farmacologico (Italie) et distribuées en France par AlaVia MEDS.